



# SPARZYME

## Detergente Enzimático

**Higiene  
Hospitalar**

### Propriedades:

SPARZYME é um detergente a base de quatro enzimas (duas proteases, amilase e lipase) utilizado na operação de limpeza, removendo resíduos orgânicos em equipamentos, artigos e instrumentos hospitalares, odontológicos e laboratoriais. O sinergismo entre as enzimas, tensoativos e antirredepositantes promovem uma rápida remoção da matéria orgânica do substrato a ser limpo. SPARZYME é isento de fosfato, EDTA, nonilfenol etoxilado e dodecil benzeno sulfonato de sódio, matérias primas essas que causam maiores impactos ambientais.

### Instruções de uso:

Para limpeza manual: Dosar 4 mL para cada litro de água (entre 20°C e 30°C) (diluição 1:250) deixando totalmente submersos os artigos abertos, desarticulados e desmontados, expondo as áreas críticas, preenchendo lúmens e canais durante um período de 5 minutos. Remover os artigos e enxaguar em água corrente (se possível em água deionizada). Para limpeza em lavadoras automáticas de instrumentos, fibroscópios e lavadoras ultrassônicas: Dosar 2 mL para cada litro (diluição de 1:500) de água potável (entre 30°C e 55°C) e seguir a programação da máquina para processo de limpeza conforme instruções do fabricante. Para água em temperatura ambiente o tempo de imersão deverá ser validado de acordo com o protocolo de limpeza do hospital. UTILIZAR IMEDIATAMENTE APÓS O PREPARO. A REUTILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DE LIMPEZA PODE PROVOCAR PERDA DA EFICIÊNCIA.

### Dados Técnicos:

Aparência:	<b>Líquido Transparente</b>
Cor:	<b>Amarelo - Âmbar</b>
Odor:	<b>Característico</b>
pH:	<b>6,0 - 8,0</b>
Peso específico:	<b>1,018 - 1,070 g/cm<sup>3</sup></b>
Viscosidade:	<b>1,0 - 10,0 cps</b>
Teor de ativos:	<b>16,0 - 20,0%</b>
Atividade Proteolítica mínima: :	<b>0,11 UP.mL<sup>-1</sup>.min<sup>-1</sup></b>
Atividade Amilolítica mínima: :	<b>0,08 UA.mL<sup>-1</sup>.min<sup>-1</sup></b>
<b>Registro do Ministério da Saúde:</b>	<b>Produto registrado na ANVISA/MS sob nº 3.0018.0175</b>

### Garantia:

Produção moderna e rigoroso controle de laboratório asseguram qualidade uniforme por todo o tempo. Assim, todos os produtos manufaturados pela Spartan do Brasil são garantidos para a total satisfação do usuário.

Tel: (19)3037-3300 - Fax: (19)3037-3320  
spartan@spartanbrasil.com.br -  
<http://www.spartanbrasil.com.br>  
FILIAL: São Paulo